

PRRSV-Diagnostik leicht gemacht ?

aCareLab stellt vor: den neuen PRRSV-Antikörpertest als Stallschnelltest.



- arbeitet mit Serum oder Plasma
- braucht ca. 60 µl, Tropfpipette ist beigelegt
- Testdauer ca. 20 min.
- semiquantitative Ergebnisabschätzung

Durchführung: ca. 3-4 Tropfen Serum oder Plasma vom Schwein in die Reaktionsvertiefung geben, Farbreaktion spätestens nach 30 min. ablesen.



Ergebnis negativ



Ergebnis ungültig



Ergebnis positiv

semiquantitative Auswertung

10 20 30 40 50 60 70 80

Werte ab ca. 40 entsprechen einer mittleren Stärke, die auch nach Impfungen zu messen ist

Und für alle die sich mehr zutrauen: unser mobiles PCR-Gerät für den PRRSV-Nachweis



Den Schnelltest erhalten Sie zum Preis von 9,90 €.

Alle Informationen dazu an unserem Servicetelefon.