


PRRSV-Diagnostik leicht gemacht ?

aCareLab stellt vor: den neuen **PRRSV-Antikörpertest als Stallschnelltest**.

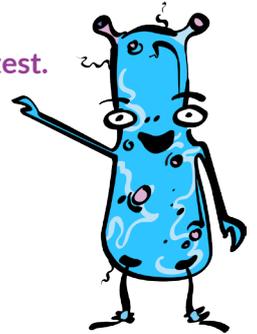

- arbeitet mit Serum oder Plasma
- braucht ca. 60 µl, Tropfpipette ist beigelegt
- Testdauer ca. 20 min
- semiquantitative Ergebnisabschätzung



Durchführung: ca. 3-4 Tropfen Serum oder Plasma vom Schwein in die Reaktionsvertiefung geben, Farbreaktion spätestens nach 30 min. ablesen.



Ergebnis negativ



Ergebnis ungültig



Ergebnis positiv

semiquantitative Auswertung



Werte ab ca. 40 entsprechen einer mittleren Stärke, die auch nach Impfungen zu messen ist

Und für alle die sich mehr zutrauen: unser **mobiles PCR-Gerät für den PRRSV-Nachweis**



Den Schnelltest erhalten Sie zum Preis von 9,90 €.

Alle Informationen dazu an unserem Servicetelefon.