



aCareCheck

How to

Wie werden Kotproben von Hund / Katze genommen ?

Alles vorbereiten und Probenset auf Vollständigkeit überprüfen:

- Probengefäß (Röhrchen mit blauem Deckel)
- Safety-Verpackungsbeutel
- Einsendeschein
- Versandkarton



Wichtig für die Probenahme! Handschuh tragen (ist beigelegt).

So nimmt man eine Kotprobe beim Hund

1. Frischen Kot abwarten: Am besten gleich beim Spaziergang.
2. Kot einsammeln:
 - Sauberen Einweg-Handschuh oder Kotbeutel verwenden.
 - Den Kot mithilfe der integrierten Deckelschaufel und/oder dem Handschuh in das Probenröhrchen geben.
 - Das Labor benötigt für die Untersuchung mindestens 3 Gramm, das entspricht ca. 3/4 des mitgelieferten Probenröhrchens.
 - Für einen sichereren Nachweis ist auch eine Probennahme an 3 aufeinanderfolgenden Tagen möglich, Proben dann zwischenzeitlich gekühlt lagern.

So nimmt man eine Kotprobe bei der Katze

1. Katzenklo kontrollieren: Warten, bis die Katze Kot abgesetzt hat.
2. Kot entnehmen:
 - Mit der integrierten Deckelschaufel aus dem Katzenklo herausnehmen und in das Probenröhrchen geben.
 - Darauf achten, dass möglichst wenig Streu an der Probe klebt.



- Am besten morgens sammeln und noch am selben Tag versenden.
- Den Begleitschein ausfüllen und mit der/den Probe/Proben in die Versandbox packen.
- Das Adress-Etikett und die Briefmarke aufkleben und das Päckchen in den Briefkasten stecken oder bei der Post direkt abgeben.

3. Wichtige Tipps:

- Hände gründlich waschen nach der Entnahme.
- Keine chemischen Mittel (z. B. Desinfektionsmittel, Katzenstreu mit Geruchsbindern) mit in die Probe bringen.
- Der Handschuh kann über den Hausmüll entsorgt werden.



aCareCheck