



# aCareCheck

## How to

## Wie wird eine Kotprobe von einem Pferd genommen ?

Alles vorbereiten und Probenset auf Vollständigkeit überprüfen:

- Probengefäß (Röhrchen mit blauem Deckel)
- Safety-Verpackungsbeutel
- Einsendeschein
- Versandkarton



Wichtig für die Probenahme! Handschuh tragen (ist beigelegt).

Für die Kotprobenahme bei Pferden sammelt man möglichst frischen Kot einzeln von jedem Pferd, idealerweise direkt aus dem Enddarm oder aus frischen Abmistungen. Die Probe von mehreren Stellen des Kotballens entnehmen. Alternativ ist auch eine Probennahme an 3 aufeinanderfolgenden Tagen möglich, Proben dann zwischenzeitlich gekühlt lagern.

Den Kot mithilfe der integrierten Deckelschaufel und/oder dem Handschuh in das Probenröhrchen geben.

Das Labor benötigt für die Untersuchung mindestens 3 Gramm, das entspricht ca. 3/4 des mitgelieferten Probenröhrchens.

Das Röhrchen mit dem Deckel fest verschließen und dann mit dem Namen des Pferdes beschriften. Das Röhrchen in den mitgelieferten Safety-Verpackungsbeutel packen und den Beutel verkleben.

Den Begleitschein ausfüllen und mit der/den Probe/Proben in die Versandbox packen.

Das Adress-Etikett und die Briefmarke aufkleben und das Päckchen in den Briefkasten stecken oder bei der Post direkt abgeben.

Der Handschuh kann über den Hausmüll entsorgt werden.